

US GEL PROFESSIONAL

Postup plnění dávkovací lahvičky z vaku 3,5kg

Otevřete vypouštěcí uzávěr vaku. Položte vak potiskem dolů na okraj desky stolu tak, aby špička přesahovala hranu stolu vypouštěcím uzávěrem. Pod uzávěrem podržte plnicí otvor lahvičky a druhou rukou stlačujte vak proti desce stolu. Gel bude plynule vytékat. Směřujte proud gelu tak, aby stékal po stěně plněné láhve a mohl z ní kolem gelu unikat vzduch. Viz Obr. 1.

Částečně vyprázdněný vak můžete před vytlačováním gelu postupně odzadu rolovat jako tubu zubní pasty, (nejlépe pod vak) tak, aby byl gel nashromážděn do špičky vaku a snadno se vytlačoval. Takto využijete všechnen koupený gel. Obr. 2.



Obr. 1. Plnění dávkovací lahvičky z plného vaku.



Obr. 2. Plnění dávkovací lahvičky z téměř prázdného vaku.